


**Précautions de prélèvement :**

S'assurer que l'extrémité de l'éponge n'entre PAS en contact avec une surface avant le prélèvement.

Le donneur ne doit PAS manger, boire, fumer ni mâcher du chewing-gum dans les 30 minutes précédant le prélèvement d'un échantillon oral.

**Application :** Ce produit est conçu pour le prélèvement et la stabilisation d'ADN à partir d'échantillons oraux humains.

**Contenu :** Contient un kit de prélèvement.

**Avertissements et précautions :** Danger de suffocation. Il convient d'être vigilant lors de l'introduction de l'éponge dans la bouche.









Lavez à l'eau si le liquide entre en contact avec les yeux ou la peau. Ne pas ingérer. Consulter la fiche signalétique sur le site [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

**Conservation :** 15 à 30 °C

**Résumé et explication du kit :**

ORACollect-DNA est un kit d'auto-prélèvement qui fournit les matériaux et les instructions pour le prélèvement d'échantillons oraux humains.

**Légende de l'étiquette :**

	Numéro de référence catalogue
	Dispositif médical de diagnostic in vitro
	Marquage CE
	Fabricant
	Représentant agréé
	Instructions de stockage
	Brevet de modèle industriel
	Prélever l'échantillon avant le (utiliser avant le)

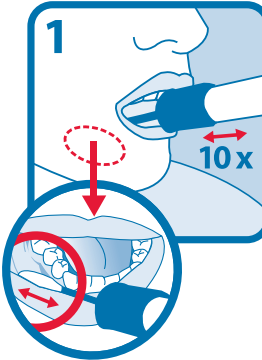
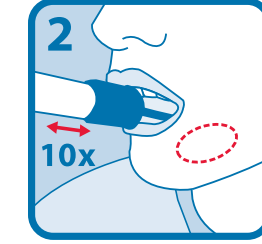
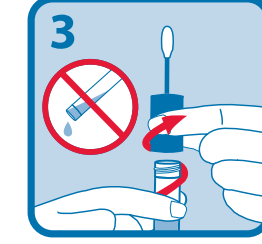
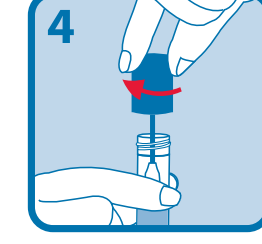
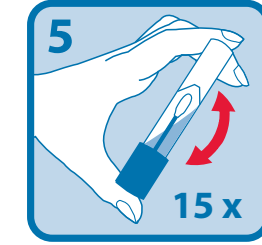
Pour obtenir des instructions de prélèvement sur un donneur dans d'autres langues, consulter [http://dnagenotek.com/DNA\\_Genotek\\_Support\\_Lit\\_UI\\_OCR-100.html](http://dnagenotek.com/DNA_Genotek_Support_Lit_UI_OCR-100.html)

**DNA genotek**


Fabriqué au Canada  
 DNA Genotek Inc.  
 Ottawa, ON, Canada K2K 1L1

Tél. : 613.723.5757  
[info@dnagenotek.com](mailto:info@dnagenotek.com)  
[www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

*Échantillons de qualité supérieure • Performances démontrées*

	Ouvrir l'emballage et retirer le collecteur sans toucher l'extrémité de l'éponge. Placer l'éponge aussi profondément que possible au fond de la bouche et frotter le long des gencives inférieures (voir l'agrandissement de l'image) en effectuant un mouvement de va-et-vient. Frotter doucement les gencives 10 fois. Éviter si possible de frotter les dents.
	Recommencer le mouvement de frottement 10 fois de l'autre côté de la bouche le long des gencives inférieures.
	Tenir le tube à la verticale pour éviter que le liquide à l'intérieur du tube ne se renverse. Dévisser le bouchon bleu du tube de prélèvement sans toucher l'éponge.
	Retourner le bouchon, introduire l'éponge à l'intérieur du tube et fermer hermétiquement le bouchon.
	Renverser le tube fermé et agiter vigoureusement 15 fois.

Brevet américain n° 7 482 116; Brevet européen n° 1 513 952 et brevet en instance; ©



Emergo Europe  
 Molenstraat 15, 2513 BH La Haye, Pays-Bas  
 Tél. : (+31) (0) 70 345-8570 Télécopie : (+31) (0) 70 346-7299

© 2011 DNA Genotek Inc., tous droits réservés.  
 PD-PR-00188-FR Issue 1/2011-06

